



NORMA - Eliminação de Dispositivos Médicos Corto-Perfurantes


(de acordo com o Artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 121/2013, de 22 de Agosto)

Regras de Segurança para Utilização dos Contentores




Não acondicionar resíduos acima do limite de enchimento

Contentor 1

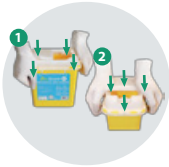


Colocação inicial da tampa
Pressionar os cantos do contentor e de seguida as laterais

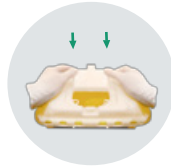

Abertura do contentor
Puxar a patilha da tampa



Encerramento temporário
Pressionar a zona "push" até a patilha ficar na posição de fecho

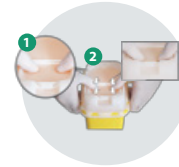

Encerramento definitivo
Pressionar os cantos e as laterais da tampa



Transporte de contentor
Pega para transporte

Contentor 2



Colocação inicial da tampa
Pressionar os cantos do contentor e de seguida as laterais



Abertura do contentor
Rodar a tampa



Encerramento temporário
Rodar a tampa até ouvir "click"



Encerramento definitivo
Pressionar os cantos da parte amarela da tampa




Transporte de contentor
Pega para transporte

Imagens meramente ilustrativas.

Princípios Fundamentais

- Adequar a capacidade do contentor à quantidade de resíduos produzidos, propiciando a sua substituição frequente de modo a minimizar a permanência dos resíduos no local de produção.
- Selecionar contentores homologados para resíduos corto-perfurantes (homologação UN, BS7320:1990 e NFX 30-500).
- Colocar o contentor próximo da área de utilização e em local seguro.
- Utilizar o sistema de extração do contentor para desadaptar os corto-perfurantes.
- Utilizar equipamento de proteção individual adequado.
- Realizar a posterior higienização das mãos.
- Não reencapsular agulhas.

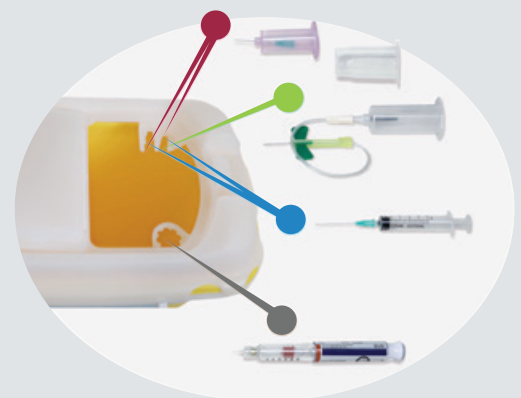

info.portugal@stericycle.com

stericycle.pt | 808 200 246